

確保本產品使用壽命的注意事項

請遵守下列注意事項，否則可能引發故障。

- 請勿使用於測量人類體溫以外的用途。
- 收入收納盒前，請務必擦乾水分。擦拭時請務必使用乾布。
- 裝置本身或收納盒請避免受到強烈衝擊，或有掉落，踩踏，震動等情況。

使用後注意事項

使用後的體溫計請加以保養，並隨時保持在乾淨狀態。

- 清除裝置本身的髒污時，請使用乾布或柔軟的棉布擦拭。
- 若髒污情況非常嚴重時，請以浸泡過清水或中性清潔劑後用力擰乾的布巾擦拭，之後再以柔軟的棉布擦拭乾淨。
- 若使用酒精清除髒污時，請避免接觸到螢幕部位。
- 請遵守下列事項，以免導致產品故障。
 - 清除污垢時，嚴禁使用揮發油與稀釋劑等。
 - 裝置本身並不具備防水規格。因此使用時請多加注意，避免水份等液體進入裝置內部。
 - 請勿以浸泡至酒精內或以熱水（超過50°C的熱水）擦拭的方式消毒體溫計的感溫部位。
 - 請勿以超音波洗淨方式進行清理。



使用後請務必將體溫計收藏於配件中的收納盒內妥善保管。

- 請勿存放在以下場所，以免導致產品故障。
 - 可能被水淋濕的場所。
 - 高溫多濕，陽光直射，暖器設備附近，灰塵較多，空氣中含有鹽分等物質的場所。
 - 可能有傾斜，搖動，或遭受撞擊的場所。
 - 保存化學藥品，或可能產生腐蝕性氣體的場所。

更換電池的方式

電池種類與數量：鋰電池CR2016（市售品）

更換電池圖示

當測溫準備動作結束（「°C」圖示閃爍）時出現右圖般圖示的話，請更換電池。

更換電池圖示

更換方式

- 1 請以小型螺絲起子拆下體溫計背面電池蓋的螺絲。
卸下螺絲
- 2 請以不容易彎折的細長物體將電池蓋與電池拆下。
電池蓋 電池
- 3 以圖中方式將電池物體將電池拆下。
十字面朝上
- 4 將電池蓋依照原有方式裝回，並以螺絲加以固定。
依照原有方式裝回

使用須知

- 當您購買本產品時，產品中已裝有試用電池。這種試用電池的電力僅能使用本產品數次，敬請見諒。
- 關於已不堪使用的電池與本產品的廢棄方式，請遵照您居住地所在的行政區法規規定。

規格

產品名稱	“歐姆龍”電子體溫計 型號：MC-672L	使用環境溫度	環境溫度：+10~+40°C， 相對濕度：30~85%RH
電源電壓	DC 3.0V (鋰電池CR2016×1個)	存放環境溫度	環境溫度：-20~+60°C， 相對濕度：10~95%RH
消耗電力	0.02W	主機重量	約 27.0g (包含電池)
電池使用壽命	約1100次 (預測測量) 約150次 (實際測量)	外觀尺寸	寬度34×長度125.2×厚度15mm
感溫部位	熱敏電阻	附屬品	●測試用電池 (鋰電池CR2016×1個) ●收藏盒 ●基礎體溫表 ●探針橡圈(3個) ●使用說明書
測量方式	預測・實際測量	測量範圍	32.00 ~ 42.00°C
體溫顯示方式表示	4位數+°C圖示， 單位：每±0.01°C		
準確度	±0.05°C (35.00~38.00°C)， ±0.1°C (32.00~34.99°C 以及 38.01~42.00°C) ※(於標準室溫23°C下，在恆溫水槽 實際測試時)		

符合EMC規範 本商品符合EMC規格 IEC 60601-1-2 :2001



廢電池請回收

製造廠名稱、地址：
Manufactured by OMRON (DALIAN) Co., Ltd.
地址：No.3 Songjiang Road, Dalian Economic & Technical Development Zone, China
For OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
地址：24 Yamanoshita-cho, Yamanouchi, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084, Japan
藥商名稱：臺灣歐姆龍健康事業股份有限公司
藥商地址：台北市中山區民權東路3段37號5樓之1

使用說明書

“歐姆龍”電子體溫計
“OMRON” Electronic Thermometer
衛署醫器陸輸字第000171號
型號：MC-672L

口中專用

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

- 非常感謝您購買OMRON產品。
- 為確保您正確及安全地操作本產品，使用前請務必詳閱本操作說明書。
- 請將本說明書置於方便取得的位置，以便日後隨時查閱。

防錯誤操作的長按型電源鍵


必須長按約兩秒以上方可關閉電源，因此可防止在測溫過程中誤關電源。

小數點下兩位數放大顯示

為提高辨識性，將基礎體溫最重要的小數點下兩位數放大顯示。

不容易移位的平板型感應器

大型平坦的感溫部位能完全貼合舌頭下方，避免於測量溫度的過程中產生移位。

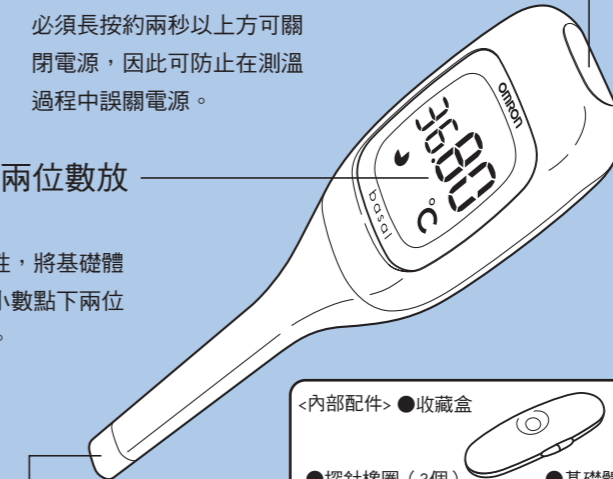

<選購品>
若需購買探針橡圈，請洽詢OMRON客服中心。



只需30秒即可測溫的原理（可加速測量的原因）


■體溫是指...

體溫是指身體深處的溫度。為了於舌頭下方測量身體深處的溫度，必須測量溫度不再變化的體溫（平衡溫）。


■測量平均溫

一般於舌頭下方測量平均溫時，需花費5分鐘左右。歐姆龍藉由新開發的高速感應器與高性能微電腦，以及獨家預測計算公式（演算法），可在約30秒鐘左右預測五分鐘後的平衡溫。
※如需更為精確的測量體溫，建議採用實際測溫功能。

因為可即時分析溫度上升的各種模式，因此可正確預測體溫。

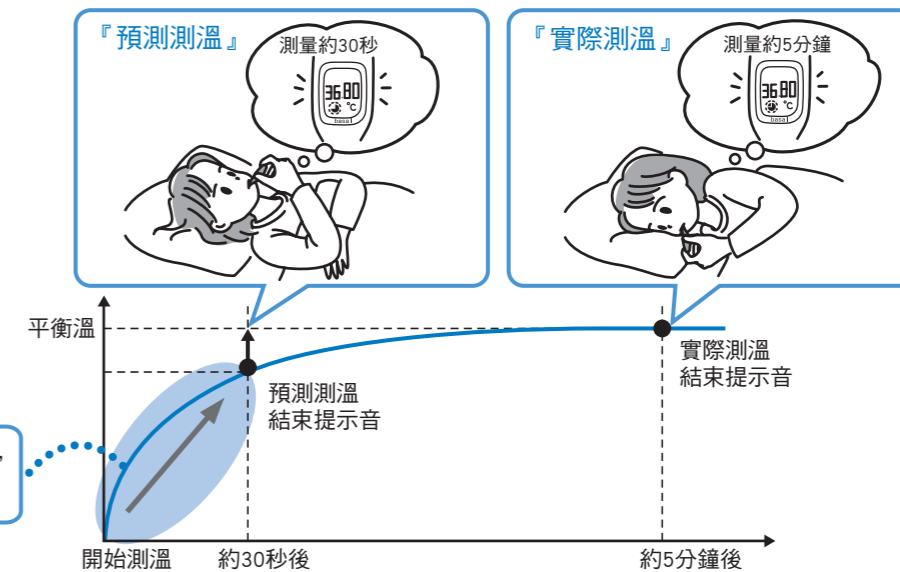

請記住此部份（測溫顯示畫面）

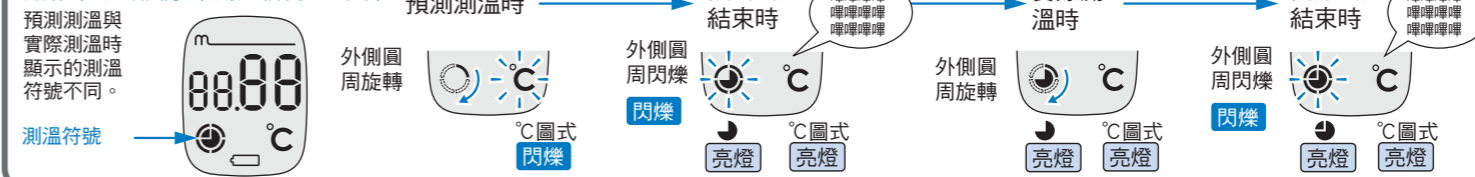

實際的測量方式請閱覽本書內頁

1665297-5B

安全須知

使用前，請務必詳閱以下內容。

以下標示的警告標誌及圖案是用來確保您正確及安全地操作本產品，以避免使用者及旁人的生命或財產遭受損害。（標誌及其含意說明如下。）

警告標誌的含意

警告 表示操作錯誤時，恐有造成人員傷亡之虞。

注意 若操作錯誤，可能造成人員傷亡或物品損壞的內容。

※所有物品損壞是指房屋／家產以及家畜／寵物等相關廣義範圍的損壞。

圖例

● 記號代表強制（務必遵守）
○ 記號代表禁止（不允許）
△ 記號代表注意（包含警告與危險意涵）

警告

自行判斷測溫結果並自行治療屬於非常危險的行為，請遵照醫師指示。
自行診斷病因可能會造成病情惡化。

本產品為口中專用的體溫計。口中以外請勿使用於測量其他部位（腋下與耳朵等）的溫度。
以免無法正確測量體溫。並且可能造成耳朵等部位受傷。

請保管在嬰幼兒無法取得的地方。並且請避免兒童單獨使用本裝置。
否則可能因測量方式不正確而受傷。

請勿在本裝置被水份等液體淋濕的狀態下進行測量。
以免無法正確測量體溫。

注意

裝置本身並不具備防水規格。請避免水分等液體滲入主機內。
否則可能造成測得的溫度有誤差，或引發故障。

使用時請避免咬斷探針橡圈。
萬一發生誤食情況時，請立即送醫。

請勿自行拆解、修理、改造。
否則可能造成測得的溫度有誤差，或引發故障。

請將電池與螺絲放置在嬰幼兒拿不到的地方。
否則可能造成嬰幼兒誤食。萬一發生誤食情況時，請立即送醫。

萬一電池液滲入眼睛，請立即以大量的清水沖洗眼睛。
否則可能造成失明等傷害。請務必接受醫師治療。

一旦電池液附著於皮膚或衣物上時，請立即以大量清水沖洗乾淨。
否則可能造成傷害。

請勿將電池投入火中。
否則可能造成電池損毀。

更換電池時，請注意勿弄錯⊕⊖方向。
以免因漏液，發熱，破裂等造成主機受損。

勿於存在著強烈靜電或電磁波的場所使用。
否則可能造成測得的溫度有誤差，或引發故障。

正確測量方式

若使用者未以正確方式測量體溫時，將無法保證測量精準度。

測量基礎體溫的要點

● 清醒後立即於床上測量。
不可進食或喝水。不可起身。

● 每天早上盡量於相同時段測量。



● 將感溫部位頂住舌頭下方的舌根，並以舌頭壓住感溫部位後，以閉上嘴巴的方式測量。
（參照下列「正確置入體溫計的方式」）

● 口中每個部位的溫度不盡相同，因此每天早上測量時請將感溫部位頂住相同位置。
（參照下列「正確置入體溫計的方式」）


● 測溫過程中不可以口部呼吸。

測溫後，將結果寫進基礎體溫表中

填寫前請先關閉體溫計的電源，若忘記測得之溫度時，只需再次開啟電源，即可顯示前次測量值。（參照右方「測量體溫的方式」之 1）

體溫計的正確置入方式

● 將探針橡圈安裝至體溫計上

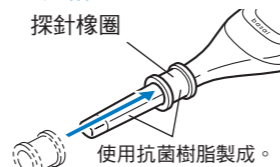

為了將體溫計保持在安定狀態，建議使用探針橡圈。
※探針橡圈屬於消耗品。若有變形或體溫計不安定的情況時，請加以更換。若需購買選購配件，請洽詢OMRON客服中心。

● 頂住舌頭下方舌根的左方或右方。



頂住的位置

● 以舌頭頂住體溫計後閉緊嘴巴。




※請將探針橡圈對準容易以牙齒或嘴唇支撐的位置。

● 以手支撐體溫計來避免移位



體溫的測量方式（測溫）


1 由收納盒中取出體溫計，並開啟電源。

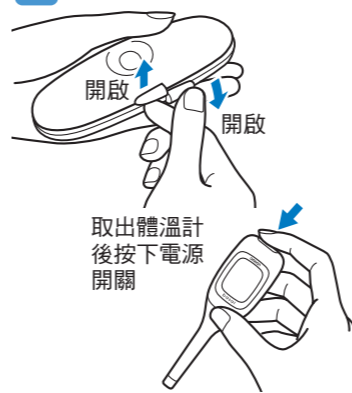


顯示部位所有圖示亮燈



顯示前次測得的體溫（顯示前次數值）

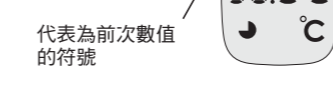

代表為前次數值的符號

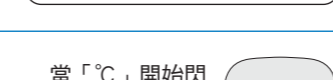


2 當「°C」圖示閃爍時，將感溫部位頂住舌頭下方的舌根部位，並閉上嘴巴。




當「°C」開始閃爍時，代表已完備準備動作



當開始預測測溫時，測溫符號的外側圓周會開始轉動，「°C」圖式則轉為閃爍

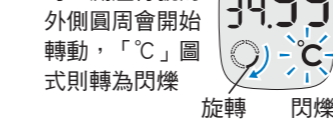

3 當等待約30秒後，體溫計發出3次「啾啾啾」的提示音時，代表已完成預測測溫動作。請確認測溫結果。

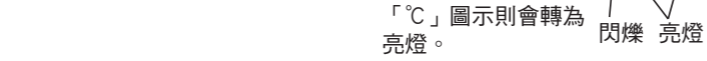

啾啾啾、啾啾啾、啾啾啾

當預測測溫動作結束時，外側的圓周會開始閃爍，而「°C」與「°C」圖式則會轉為亮燈。

4 關閉電源後，將體溫計收入收納盒中。
按住電源開關2秒鐘，體溫計會在發出「啾」聲後關閉電源。



使用須知 若未關閉電源時，體溫計將接著執行實際測溫動作。即使任其閒置，體溫計也會因自動關機功能於大約3分鐘後自行關閉電源。

要以實際測溫方式測量時

只需緊閉嘴巴，並持續以舌頭壓住體溫計，體溫計會在完成步驟3的預測測溫動作約30秒後，自動接著執行實際測溫。在經過約5分鐘後，體溫計會發出三次「啾啾啾」的提示音，代表已完成實際測溫動作，此時請確認測溫結果，並關閉體溫計電源將其收進收納盒中。

疑難排解

■ 測得之溫度過高。

確認此處	處置方式
是否剛進食或已起身。	請在起床後完全未有任何動作的情況下測量。
是否將體溫計自溫度較高的房間中取來後，就馬上進行測量？	若體溫計內部殘留著溫度高於室溫的空氣時，可能無法正確進行測量。請至少放置三分鐘後，再開啟電源。

※當測溫結果超過42°C時，將顯示「H」。

■ 測得之溫度過低。

確認此處	處置方式
口中溫度是否過低？	請先閉緊嘴巴3分鐘左右後，再進行測量。
是否連續進行測溫？	請先關閉電源，並間隔30秒以上後再行測量。

※當測溫結果未達32°C時，將改為顯示「L」。

■ 每次測得的溫度值皆不同。

確認此處	處置方式
測量時是否有下列情況？ • 體溫計移動，導致感溫部位移位。 • 每次測量時，感溫部位頂住的位置皆不同。 • 測溫過程中嘴巴張開了。	請確認「正確測量方式」中的「基礎體溫測量要點」與「正確置入體溫計的方式」。

■ 在準備測溫結束時不會出現「L」圖示。

當感溫部位的溫度未滿32°C時顯示「L」。但若超過32°C時，則顯示實際溫度。

確認此處	處置方式
是否連續進行測溫？	請先關閉電源，並間隔30秒以上後再行測量。

【注意事項】
若外部氣溫（周圍環境溫度）超過32°C時，可能導致感溫部位過熱，進行顯示溫度。此時請直接測量體溫。此外當開啟電源後經過10秒以上時，體溫計可能會自動展開預測測溫動作。此時請重新開啟電源，並確認螢幕顯示測溫準備動作完成的畫面後，再進行測量。

■ 即使按下電源鍵，螢幕也不會顯示任何畫面。

確認此處	處置方式
電池的⊕⊖方向是否錯誤？	請以正確方式裝入電池。
電池電量是否已耗盡？	顯示部位是否出現「」圖示？請更換新電池（CR2016）。

顯示測得的溫度值以外的圖示（錯誤訊息）

顯示內容	顯示錯誤訊息的原因	處置方式
	可能是體溫計本身故障。	請洽詢OMRON客服中心。
	之前將體溫計保管於超過約40°C的環境中。	請先放置於10°C~40°C的房間內至少一分鐘後，再進行測量。
	之前將體溫計保管於未滿約10°C的環境中。	請先放置於10°C~40°C的房間內至少一分鐘後，再進行測量。