

## 更換電池的方式

電池種類與數量：鹼錳鈕釦型電池LR41（市售品）

### 更換電池圖示

若開啟電源後出現右圖般圖示時，請更換電池。


更換電池圖示

### 更換方式


※當體溫計沾到水時，請勿開啟電池蓋。

**1** 以小型螺絲起子卸下體溫計背面的電池蓋螺絲，並將電池蓋拆下。

※拆下螺絲時，請注意避免遺失防水橡膠圈。

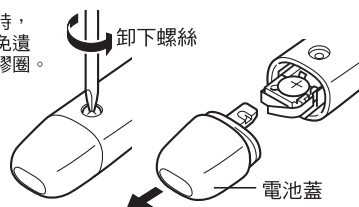

**2** 以不容易彎折的細長物體將電池拆下。

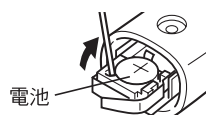

※拆除電池時，電池可能會飛出，敬請多加注意。

**3** 以圖中方式將電池（十字面朝上）裝入。



**4** 請將電池蓋依照原有方式裝回，並以螺絲加以固定。



### 使用須知

- 當您購買本產品時，產品中已裝有試用電池。這種試用電池的電力僅能使用本產品數次，敬請見諒。
- 關於已不堪使用的電池與本產品的廢棄方式，請遵照您居住地所在的行政區法規規定。

## 規格

產品名稱	“歐姆龍”電子體溫計 型號：MC-171W	存放環境 溫濕度	環境溫度：-20~+60°C 相對濕度：30~95%RH
電源電壓	DC 1.5V（鹼錳鈕釦型電池LR41 X 1個）	防水性	標準用JIST1140規定的防滲透型式。
消耗電力	0.1mW	主機重量	約13.0g（包含電池）
電池使用壽命	約1100次（每天使用10分鐘，約可使用三年）	外觀尺寸	寬度19.6×長度129.7×厚度13.2mm
感溫部位	熱敏電阻	附屬品	●測試用電池（鹼錳鈕釦型電池LR41×1個） ●收藏盒 ●使用說明書
測量方式	實際測量		
體溫顯示方式表示	3位數+°C圖示，單位：每0.1°C		
精密度	±0.1°C（於標準室溫23°C下，於恆溫水槽實際測量的情況）		
測量範圍	32.0~42.0°C		
使用環境 溫濕度	環境溫度：+10~+40°C 相對濕度：30~85%RH		

符合EMC規範 本商品符合EMC規格 IEC 60601-1-2:2001



廢電池請回收

製造業者名稱及地址：Manufactured by OMRON DALIAN CO., LTD(地址: No.3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, China) for OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (地址: 53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002, Japan)。  
醫療器材商名稱：臺灣歐姆龍健康事業股份有限公司  
醫療器材商地址：台北市松山區復興北路367號9樓

## 使用說明書


“歐姆龍”電子體溫計  
“OMRON” Electronic Thermometer  
衛署醫器陸輸字第000171號  
型號：MC-171W

腋下・口含

採用防水規格，可完全放入水中清洗，因此能常保清潔  
（符合JIS基準的防滲透型式）

不容易移位的平板型感應器  
大型平坦的感溫部位能完全貼合腋下或舌頭下方，避免於測量溫度的過程中產生移位。

辨識度極佳的超大型液晶畫面  
可清楚確認測溫結果。

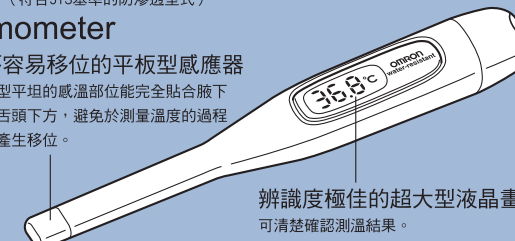

- 非常感謝您購買OMRON製品。
- 為確保您正確及安全地操作本產品，使用前請務必詳閱本操作說明書。
- 請將本說明書置於方便取得的位置，以便日後隨時查閱。

<內部配件>


- 收藏盒



## 體溫計的正確放入方式

於腋下測量時

- 頂住腋下的中央部位

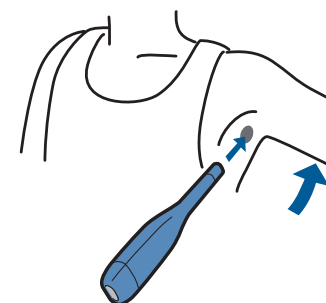


於口中測量時

- 頂住舌頭下方舌根的左方或右方



## 若有下列情況時將無法正確進行測量

- 運動，沐浴，進食後立即測量  
請間隔30分鐘以上。

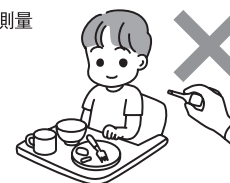

- 腋下出汗時  
●長時間置身於棉被中時  
請先擦乾腋下的汗水。



- 起床後剛開始活動時

請於起床後尚未活動前立即測量，若已開始活動，請間隔30分鐘以上後再行測量。

※這是因為起床後開始活動時，體溫或偏高所致。

實際的測量方式請閱覽本書內頁

1665294-0D

## 安全須知

使用前，請務必詳閱以下內容。

以下標示的警告標誌及圖案是用來確保正確及安全地操作本產品，以避免使用者及旁人的生命或財產遭受損害。（標誌及其含意說明如下。）

### 警告標誌的含意

**警告** 表示操作錯誤時，恐有造成人員傷亡之虞。

**注意** 若操作錯誤，可能造成人身傷害或物品損壞※的內容。

※所有物品損壞是指房屋/家畜以及家畜/寵物等相關廣義範圍的損壞。

### 圖例

● 記號代表強制 (務必遵守)    ⊘ 記號代表禁止 (不允許)    △ 記號代表注意 (包含警告與危險意涵)

### 警告

自行判斷測溫結果並自行治療屬於非常危險的行為，請遵照醫師指示。自行診斷病因可能會造成病情惡化。

本產品為腋下與口中用的體溫計。請勿使用於測量其他部位（耳朵等）的溫度。以免無法正確測量體溫。並且可能造成耳朵等部位受傷。

請保管在嬰幼兒無法取得的地方。並且請避免兒童單獨使用本裝置。否則可能因測量方式不正確而受傷。

請勿在本裝置被水份等液體淋濕的狀態下進行測量。以免無法正確測量體溫。

### 注意

請勿自行拆解、修理、改造。否則可能造成測得的溫度有誤差，或引發故障。

請將電池與螺絲放置在嬰幼兒拿不到的地方。否則可能造成嬰幼兒誤食。萬一發生誤食情況時，請立即送醫。

萬一電池液滲入眼睛，請立即以大量的清水沖洗眼睛。否則可能造成失明等傷害。請務必接受醫師治療。

一旦電池液附著於皮膚或衣物上時，請立即以大量清水沖洗乾淨。否則可能造成傷害。

請勿將電池投入火中。否則可能造成電池損毀。

更換電池時，請注意勿弄錯 ⊕ ⊖ 方向。以免因漏液、發熱、破裂等造成主機受損。


勿於存在著強烈靜電或電磁波的場所使用。否則可能造成測得的溫度有誤差，或引發故障。

## 正確測量方式


若使用者未以正確方式測量體溫時，將無法保證測量精準度。

### 於腋下測量時

#### ●頂住腋下的中央部位

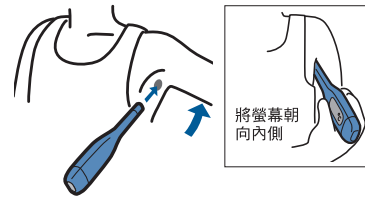


#### ●稍微由下方往上抬後將其夾住（夾緊腋下）

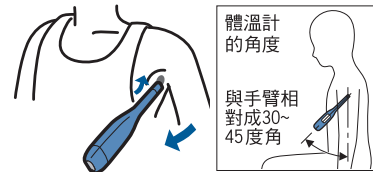


※使用於嬰幼兒等兒童身上時，請輕輕壓住其手臂，以避免其腋下翹起。

### 於口中測量時

#### ●頂住舌頭下方舌根的左方或右方

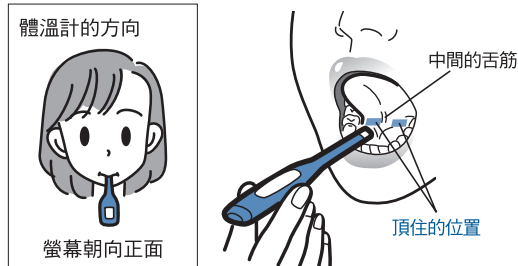

#### ●以舌頭頂住體溫計後閉緊嘴巴

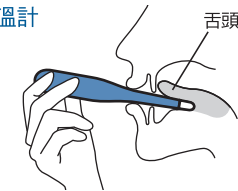

#### ●以手支撐體溫計來避免移位



## 體溫的測量方式（測溫）

### 1 開啟體溫計電源。

按下電源鍵



顯示部位所有圖示亮燈



顯示前次測得的體溫（顯示前次數值）




準備測溫中



代表為前次數值的符號

### 2 當「°C」圖示開始閃爍時，請將感溫部位頂住腋下中央，並夾緊腋下。



※若要於口中測量時，請頂住舌下的舌根部位

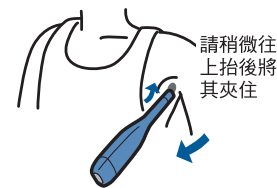

請稍微往上抬後將其夾住

當「°C」開始閃爍時，代表已完成測溫準備動作


裝置將自動開始測溫，此時「°C」圖示將不斷閃爍

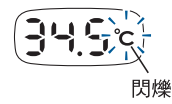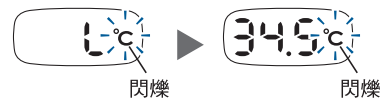

【注意】若外部氣溫（周圍環境溫度）超過32°C時，可能會導致感溫部位一開始就過熱，並使得體溫計在尚未測量前就顯示溫度。此時請先以充分擰乾的濕毛巾等物品冷卻感溫部位後再行測量。

### 3 當測得的溫度到達安定狀態時，裝置會連續三次發出「啾啾啾」的提示音。請確認測溫結果。

當測得的溫度值非常安定時，「°C」圖示會轉為持續亮燈

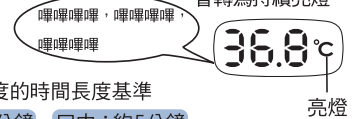

正確測量溫度的時間長度基準  
腋下：約10分鐘    口中：約5分鐘

### 4 請關閉電源，並將體溫計收入收納盒中。

#### 使用須知

雖然本裝置會在約30分鐘後（閒置狀態下則為約3分鐘後）自動關閉電源，但為了維護電池壽命，請於不用時隨時關閉電源。

## 疑難排解

### ■每次測得的溫度值皆不同。

確認此處	處置方式
是否每次測量時，體溫計感溫部位頂住的位置皆不同？	請確認「正確測量方式」中的「正確置入體溫計的方式」頁面。

### ■即使按下電源鍵，螢幕也不會顯示任何畫面。

確認此處	處置方式
電池的⊕⊖方向是否錯誤？	請以正確方式裝入電池。
電池的電量是否已耗盡？	顯示部位是否出現「」圖示？請更換新電池（LR41）。

■在準備測溫的過程中不會出現「37.0°C」圖示。若顯示「36.9°C」~「37.1°C」時，可直接使用。但若即使重新開啟電源後仍不斷顯示超出「36.9°C」~「37.1°C」範圍的圖示時，請洽詢歐姆客服中心。

## 顯示測得的溫度值以外的圖示

顯示內容	顯示錯誤訊息的原因	處置方式
L	感溫部位的溫度未滿32°C時顯示。	此狀態並非故障，請直接測量體溫。
H	感溫部位的溫度超過42°C時顯示。	可能是週遭環境溫度超過42°C所致。請先冷卻感溫部位後再行測量。

## 確保本產品使用壽命的注意事項

請遵守下列注意事項，否則可能引發故障。

- 請勿使用於測量人類體溫以外的用途。
- 裝置本身或收納盒請避免受到強烈衝擊，或有掉落、踩踏、震動等情況。
- 收入收納盒前，請務必擦乾水分。擦拭時請務必使用乾布。

## 使用後注意事項

使用後的體溫計請加以保養，並隨時保持在乾淨狀態。

- 請勿用力沖水，或長時間泡在水中。
- 清除裝置本身的髒污時，請使用乾布或柔軟的棉布擦拭。
- 若髒污情況非常嚴重時，請先以沾溼清水或中性清潔劑的布巾擦拭，或輕輕沖水後，再以柔軟的乾布擦乾。
- 若使用酒精清除髒污時，請避免接觸到螢幕部位。
- 請遵守下列事項，以免導致產品故障。
  - 清除污垢時，嚴禁使用揮發油與稀釋劑等。
  - 使用時請多加注意，避免水份等液體進入裝置內部。
  - 請勿以浸泡至酒精內或以熱水（超過50°C的熱水）擦拭的方式消毒體溫計的感溫部位。
  - 請勿以超音波洗淨方式進行清理。

使用後請務必將體溫計收藏於配件中的收納盒內妥善保管。

- 請勿存放在以下場所，以免導致產品故障。
  - 可能被水淋濕的場所。
  - 高溫多濕，陽光直射，暖器設備附近，灰塵較多，空氣中含有鹽分等物質的場所。
  - 可能有傾斜，搖動，或遭受撞擊的場所。
  - 保存化學藥品，或可能產生腐蝕性氣體的場所。